

**Lista de frecuencias para el equipo
MEDISEND super y MEDISEND super C**



Indicación	Anillo/Lazo-Magnetico/lugar	AUTO / MAN	MOD	Intensidad	1.Paso	2. Paso
Tratamiento basico	Solarplexo	AUTO	CON	10	1-1000 Hz	
A						
Acne	Foco	MAN	CON	10	1,2 Hz	10 Hz
Adnexitis	Vientre	MAN	CON	1	1,2 Hz	73 Hz
Alergia	Solarplexo	AUTO	CON	10	1-1000 Hz	1-1000 Hz
Tratamiento en cambio:	Foco	MAN	5s/5s	10	3 Hz	330 Hz
Alergia al frio	Solarplexo	MAN	5s/5s	10	3 Hz	330 Hz
Alergia al sol	Solarplexo	MAN	CON	10	3 Hz	330 Hz
Alteración del sueño	Solarplexo	MAN	5s/5s	1	3 Hz	3 Hz
Alteracion en circulatorio	Foco	AUTO	CON	10	1-100 Hz	
2. Paso		MAN	CON	10		400 Hz
Amenorrea	Solarplexo	MAN	5s/5s	10	20 Hz	290 Hz
Angina pectoris	Pecho	MAN	CON	1	3 Hz	230 Hz
Arterioesclerosis	Cabeza	MAN	5s/5s	10	3 Hz	330 Hz
Tratamiento en cambio:	Cabeza	MAN	5s/5s	10	7,8 Hz	7,8 Hz
Arthritis agudo	Foco	MAN	CON	10	1,2 Hz	7,8 Hz
Tratamiento en cambio:	Foco	MAN	CON	10	10 Hz	28 Hz
Arthritis cronica	Foco	AUTO	CON	10	1-100 Hz	
2. Paso	Foco	MAN	CON	10		30 Hz
Artrosis	Foco	MAN	5s/5s	10	10 Hz	27,5 Hz
Ascites	Vientre	MAN	5s/5s	10	7,8 Hz	73 Hz
Asma bronquial	Pecho	MAN	5s/5s	1	1,2 Hz	1,2 Hz
Asma bronquial	Pecho	MAN	5s/5s	1	1,2 Hz	1,2 Hz
Atrofia muscular	Foco	MAN	5s/5s	10	10 Hz	28 Hz
B						
Bronquitis	Pecho	MAN	CON	10	1,2 Hz	73 Hz

Indicación	Anillo/Lazo-Magnetico/lugar	AUTO / MAN	MOD	Intensidad	1.Paso	2. Paso
C						
Carcinoma	Foco	AUTO	CON	10	1–100 Hz	
2. Paso	Foco	MAN	CON	10		410 Hz
Casos postoperatorios y ortopedia	Foco	MAN	CON	10	7,8 Hz	7,8 Hz
Cistitis	Vejiga	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	400 Hz
Claudicatio intermittens	Cabeza	MAN	5s/5s	1	45 Hz	48 Hz
Climaterio	Cadera	AUTO	CON	10	1–100 Hz	
2. Paso	Cadera	MAN	CON	10		10 Hz
Colitis Ulcerosa	Vientre	MAN	CON	10	1,2 Hz	73 Hz
Conjuntivitis	Cabeza	MAN	CON	1	1,2 Hz	80 Hz
Contusion	Foco	MAN	CON	10	9,1 Hz	110 Hz
D						
Debilidad en la potencia	Gonadas	MAN	5s/5s	10	10 Hz	100 Hz
Debilidad inmune	Solarplexo	MAN	5s/5s	10	10 Hz	230 Hz
Decalsificación	Foco	AUTO	CON	10	1–100 Hz	
2. Paso	Foco	MAN	CON	10		450 Hz
Depresión endogene	Solarplexo	MAN	5s/5s	1	1,2 Hz	73 Hz
Depresión exogena	Solarplexo	MAN	5s/5s	10	35 Hz	700 Hz
Diabetes	Hipogastrio	MAN	5s/5s	10	35 Hz	700 Hz
Distonia vegetativa	Cabeza	AUTO	CON	10	1–100 Hz	
2. Paso	Cabeza	MAN	CON	1		40 Hz
Distorsion	Foco	MAN	CON	10	9,1 Hz	110 Hz
Dolor en general	Foco	AUTO	CON	10	1–1000 Hz	1–1000 Hz
Dolores fantasmas	Foco	AUTO	CON	10	1-100 Hz	1-100 Hz
E						
Edema	Vientre	MAN	5s/5s	10	7,8 Hz	73 Hz
Enfermedades agudas en general.	Foco	MAN	CON	1	1,2 Hz	73 Hz
Enfermedades crónicas en general	Foco	MAN	5s/5s	10	10 Hz	27,5 Hz
Tratamiento en cambio	Foco	MAN	5s/5s	10	73 Hz	73 Hz

Indicación	Anillo/Lazo-Magnetico/lugar	AUTO / MAN	MOD	Intensidad	1.Paso	2. Paso
Enfermedades crónicas en general	Foco	MAN	5s/5s	10	10 Hz	27,5 Hz
Tratamiento en cambio	Foco	MAN	5s/5s	10	73 Hz	73 Hz
Enfermedades de piel	Foco	MAN	CON	10	200 Hz	1000 Hz
Enteritis	Solarplexo	MAN	CON	10	1,2 Hz	73 Hz
Enuresis nocturna	Vejiga	MAN	5s/5s	10	3,5 Hz	3,5 Hz
Epicondilitis	Foco	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	250 Hz
Extracción dental Tratamiento posterior	Foco	MAN	CON	10	7,8 Hz	7,8 Hz
F						
Falta de apetito	Solarplexo	MAN	5s/5s	10	10 Hz	10 Hz
Falta de fuerza	Solarplexo	MAN	5s/5s	1	27,5 Hz	60 Hz
Faringitis	Cuello	MAN	CON	10	1,2 Hz	73 Hz
Fibrosis pulmonar	Pecho	AUTO	CON	10	1-100 Hz	27,5 Hz
Tratamiento en cambio	Pecho	MAN	CON	10	220 Hz	410 Hz
Fracturas	Foco	MAN	CON	10	220 Hz	230 Hz
Fungitis	Foco	MAN	CON	10	258 Hz	258 Hz
G						
Gastritis	Estomago	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	380 Hz
H						
Hemorragia nasal	Cabeza	MAN	CON	1	8,6 Hz	73 Hz
Hemorroides	En gluteos	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	1,2 Hz
Hepatitis (A/B)	Higado	MAN	CON	10	1,2 Hz	28 Hz
Heridas	Foco	AUTO	CON	10	1-100 Hz	
2. Paso	Foco	MAN	CON	10		220 Hz
Heridas de difícil curación	Foco	AUTO	CON	10	1-100 Hz	
2. Paso	Foco	MAN	CON	10		40 Hz
Herpes zoster	Foco	MAN	CON	10	200 Hz	1000 Hz
Higado-Molestias	Higado	MAN	CON	10	8,6 Hz	73 Hz
Hiperacidez	Solarplexo	MAN	CON	1	7,8 Hz	230 Hz
Hipermenorrea	Hipogastrio	MAN	5s/5s	1	3 Hz	3 Hz

Indicación	Anillo/Lazo-Magnetico/lugar	AUTO / MAN	MOD	Intensidad	1.Paso	2. Paso
Hipertiroidismo	Cuello	MAN	CON	1	3 Hz	5 Hz
Hipotireose	Cuello	MAN	5s/5s	10	12 Hz	35 Hz
Hipotonía	Solarplexo	AUTO	CON	10	1–100 Hz	
2. Paso	Solarplexo	MAN	CON	10		40 Hz
Hypertonie esencial	Cuello	MAN	5s/5s	1	3,0	10 Hz
Hypoacidez	Vientre	AUTO	CON	10	1–100 Hz	
2. Paso	Vientre	MAN	CON	10		20 Hz
I						
Infección en general	Foco	MAN	CON	10	1,2 Hz	73Hz
Inflamación ojos	Cabeza	MAN	CON	1	1,2 Hz	80 Hz
Inflamación de pulmón (dyspnoe)	Pecho	AUTO	CON	10	1–100 Hz	
2. Paso	Pecho	MAN	CON	1		10 Hz
Inflamación de Vesicular Biliar	Vesicula Biliar	MAN	CON	10	1,2 Hz	330 Hz
Inflamación en parpados	Cabeza	MAN	CON	1	1,2 Hz	80 Hz
Inflamación resistente a terapia	Foco	MAN	CON	10	1,2 Hz	7,7 Hz
Tratamiento en cambio	Foco	MAN	CON	10	10 Hz	28 Hz
Insuficiencia de pancreas	Pancreas	MAN	5s/5s	10	10 Hz	250 Hz
Insuficiencia cardíaca	Pecho	AUTO	CON	10	1–100 Hz	
2. Paso	Pecho	MAN	CON	1		8 Hz
Insuficiencia intestinal	Vientre	MAN	5s/5s	10	10 Hz	210 Hz
Insuficiencia renal	Riñon	MAN	CON	10	10 Hz	40 Hz
Intranquilidad, Nerviosismo	Cuello	MAN	5s/5s	1	3 Hz	3 Hz
L						
Laringitis	Cuello	MAN	CON	10	1,2 Hz	73 Hz
Lesiones	Foco	MAN	CON	10	7,8 Hz	7,8 Hz
Linfatico-estancamiento	Foco	MAN	CON	10	6,3 Hz	148 Hz
Lumbago	Cadera	MAN	CON	10	10 Hz	130 Hz
Lumbago / Sindrom Lumbar-columna	Foco	MAN	5s/5s	10	10 Hz	27,5 Hz
Luxación	Foco	MAN	CON	10	9,1 Hz	110 Hz

Indicación	Anillo/Lazo-Magnetico/lugar	AUTO / MAN	MOD	Intensidad	1.Paso	2. Paso
M						
Menstruación Alteraciones	Hipogastrio	MAN	5s/5s	10	20 Hz	290 Hz
Migrañas (durante los intervalos) Durante el ataque: Entrada MAGNETOPOINT en el lado de la migraña / Salida Anillo/Lazo magnético	Cabeza	MAN	5s/5s	1	10 Hz	10 Hz
Miositis	Foco	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	73 Hz
Molestia neurologicas y neurovegetativas	Solarplexo	AUTO	CON	1	1-100 Hz	1-100 Hz
Molestias circulatorias 2. Paso	(Foco) cabeza	AUTO MAN	CON CON	10 10	1-100 Hz	40 Hz
Molestias en cadera Protesis total	Cadera	MAN	5s/5s	10	10 Hz	10 Hz
Molestias generales en vientre	Vientre	MAN	5s/5s	10	3 Hz	3 Hz
Molestias por cicatriz	Cicatriz	MAN	CON	10	18 Hz	18 Hz
Molestias respiratorias 2. Paso	Pecho Pecho	AUTO MAN	CON CON	10 1	1-100 Hz	10 Hz
Molestias Sicosomaticas 2. Paso	Solarplexo Solarplexo	AUTO MAN	CON CON	10 1	1-100 Hz	330 Hz
Morbus Bechterew Tratamiento en cambio	Espalda Espalda	MAN MAN	5s/5s 5s/5s	10 10	10 Hz	28 Hz
Morbus Crohn	Vientre	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	73 Hz
Morbus Scheuermann	Sternon	MAN	5s/5s	10	4,6 Hz	73, Hz
Morbus Sudeck 2. Paso	Foco Foco	AUTO MAN	CON CON	10 10	1-100 Hz	1000 Hz
Multiple esclerosis	Solarplexo	MAN	5s/5s	10	10 Hz	230 Hz
Muslo Neuralgia	Muslo	AUTO	CON	10	1-100 Hz	1-100 Hz

Indicación	Anillo/Lazo-Magnetico/lugar	AUTO / MAN	MOD	Intensidad	1.Paso	2. Paso
N						
Nefritis	Riñon	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	73 Hz
Nefrosis	Riñon	MAN	CON	10	20 Hz	240 Hz
Nervosismo	Solarplexo	MAN	CON	1	3 Hz	3 Hz
Neuralgia Braquial	Codo	AUTO	CON	10	1–100 Hz	1–100 Hz
Neuralgia intercostal	Foco	AUTO	CON	10	1–100 Hz	1–100 Hz
Neurosis	Cuello	AUTO	CON	1	1-100 Hz	
2. Paso	Cuello	MAN	CON	1		28 Hz
O						
Oophoritis	Ovarios	MAN	CON	10	1,2 Hz	73 Hz
Osteocondrose	Cadera	MAN	5s/5s	10	10 Hz	40 Hz
Ostipation	Vientre	MAN	5s/5s	10	7,8 Hz	73 Hz
Otitis media	Cabeza	MAN	CON	10	1,2 Hz	73 Hz
P						
Paresias	Foco	AUTO	CON	10	1-100 Hz	1-100 Hz
Paresis despues de apoplejia	Cabeza	AUTO	CON	10	1–100 Hz	1-1000 Hz
Paralisis Facial	Foco	AUTO	CON	10	1–100 Hz	
2. Paso	Foco	MAN	CON	1		400 Hz
Parese espastica	Cabeza	MAN	CON	10	45 Hz	48 Hz
Parkinson	Solarplexo	MAN	5s/5s	10	7,8 Hz	7,8 Hz
Periadenitis	Foco	MAN	CON	10	1,2 Hz	73 Hz
Periartritis	Foco	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	250 Hz
Peritonitis	Vientre	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	280 Hz
Pielonefritis	Riñon	AUTO	CON	10	1-100 Hz	
2. Paso	Riñon	MAN	CON	1		8 Hz
Piernas inflamadas	Pierna	MAN	5s/5s	10	78 Hz	78 Hz
Pleuritis	Pecho	MAN	CON	10	1,2 Hz	73 Hz
Poliartritis crónica	Foco	AUTO	CON	10	1-100 Hz	1-100 Hz
Prostata Adenom	Prostata	AUTO	CON	10	1-100 Hz	
2. Paso	Prostata	MAN	CON	10		410 Hz

Indicación	Anillo/Lazo-Magnético/lugar	AUTO / MAN	MOD	Intensidad	1.Paso	2. Paso
Prostatitis	Prostata	AUTO	CON	10	1-100 Hz	
2. Paso	Prostata	MAN	CON	10		230 Hz
Protosis de articulación floja	Foco	MAN	5s/5s	10	10 Hz	10 Hz
Pseudoartrosis	Foco	AUTO	CON	10	1-100 Hz	
2. Paso	Foco	MAN	CON	10		10 Hz
Quemaduras	Foco	AUTO	CON	10	1-100 Hz	
2. Paso	Foco	MAN	CON	10		200 Hz
R						
Reuma extraarticular	Foco	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	250 Hz
Rinitis	Cabeza	MAN	CON	10	1,2 Hz	73 Hz
Roemheld síndrome	Vientre	AUTO	CON	10	1-100 Hz	
2. Paso	Vientre	MAN	CON	10		220 Hz
S						
Sensible al clima	Solarplexo	MAN	CON	1	7,8 Hz	8,5 Hz
Tratamiento en cambio	Solarplexo	MAN	CON	1	10 Hz	10 Hz
Síndrome columna Torácica	Foco	MAN	5s/5s	10	10 Hz	27,5 Hz
Síndrome columna cervical	Foco	MAN	5s/5s	10	10 Hz	27,5 Hz
Síndrome Dupuytren mano	Mano	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	250 Hz
Síndrome metacarpiano	Mano	MAN	5s/5s	1	73 Hz	77 Hz
Tratamiento en cambio	Mano	AUTO	CON	1	1-1000 Hz	73 Hz
Sinusitis	Cabeza	MAN	CON	10	1,2 Hz	73 Hz
Soriasis	Foco	MAN	CON	10	60 Hz	110 Hz
Spondiliose	Foco	MAN	5s/5s	10	10 Hz	10 Hz
Spondilitis aguda	Foco	MAN	CON	10	1,2 Hz	73 Hz
Tratamiento en cambio	Foco	MAN	CON	10	10 Hz	28 Hz
Spondilitis crónica	Foco	AUTO	CON	10	1-100 Hz	
2. Paso	Foco	MAN	CON	10		3 Hz
Stiloiditis	Foco	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	250 Hz

Indicación	Anillo/Lazo-Magnetico/lugar	AUTO / MAN	MOD	Intensi-dad	1.Paso	2. Paso
T						
Tendomiopatia	Foco	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	250 Hz
Tendovaginitis	Foco	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	250 Hz
Tinnitus	Cabeza	MAN	CON	1	10 Hz	1000 Hz
Tonsilitis	Cuello	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	73 Hz
Tratamiento simbiotico	Vientro bajo	MAN	5s/5s	1	10 Hz	42 Hz
Trigeminus-Neuralgia aguda	Foco	AUTO	CON	10	1–100 Hz	
2. Paso	Foco	MAN	CON	1		1000 Hz
Trigeminus-Neuralgia cronica	Foco	MAN	CON	10	7,8 Hz	270 Hz
Trombosis de venas	Foco	MAN	CON	1	685 Hz	685 Hz
U						
Ulceraciones	Foco	AUTO	CON	10	1–100 Hz	
2. Paso	Foco	MAN	CON	10		410 Hz
Ulceras en general	Foco	MAN	CON	10	1,2 Hz	73 Hz
Ulceras en piernas	Pierna	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	73 Hz
Ulcus cruris	Pierna	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	73 Hz
Ulcus ventriculi y duodeno	Vientre	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	73 Hz
Uretritis	urogenital	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	400 Hz
V						
Varices	Foco	MAN	5s/5s	10	1,2 Hz	28 Hz
Vertigo	Solarplexo	MAN	5s/5s	1	60 Hz	60 Hz